

MPI Implant System

Instrucciones para importar las librerías de MPI
en el software Exocad

exocad

Descargar el software

Desde un ordenador, conectarse a **www.mpimplants.com**

En el menú DESCARGAS, ir al apartado CAD/CAM y pulsar en "LIBRERÍA EXOCAD" Se descargará un archivo llamado "MPI-Implant Library Exocad.zip" en la carpeta *Descargas* de su PC.



Descomprimir el archivo

Vaya a la carpeta *Descargas* de su PC y descomprima el archivo llamado: "MPI-Implant Library Exocad.zip". Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como **WinZip** o **WinRar**.


Cuando descomprima el archivo le saldrá una carpeta llamada "MPI-Implant Library Exocad" que contiene las librerías de MPI para Exocad.

Mantenga abierta la carpeta *Descargas*.




Localizar la carpeta de librerías en Exocad

Abra la ventana donde se encuentran sus librerías de Exocad. Para ello vaya buscándolas a través del navegador de archivos de su ordenador en la ruta que se indica.


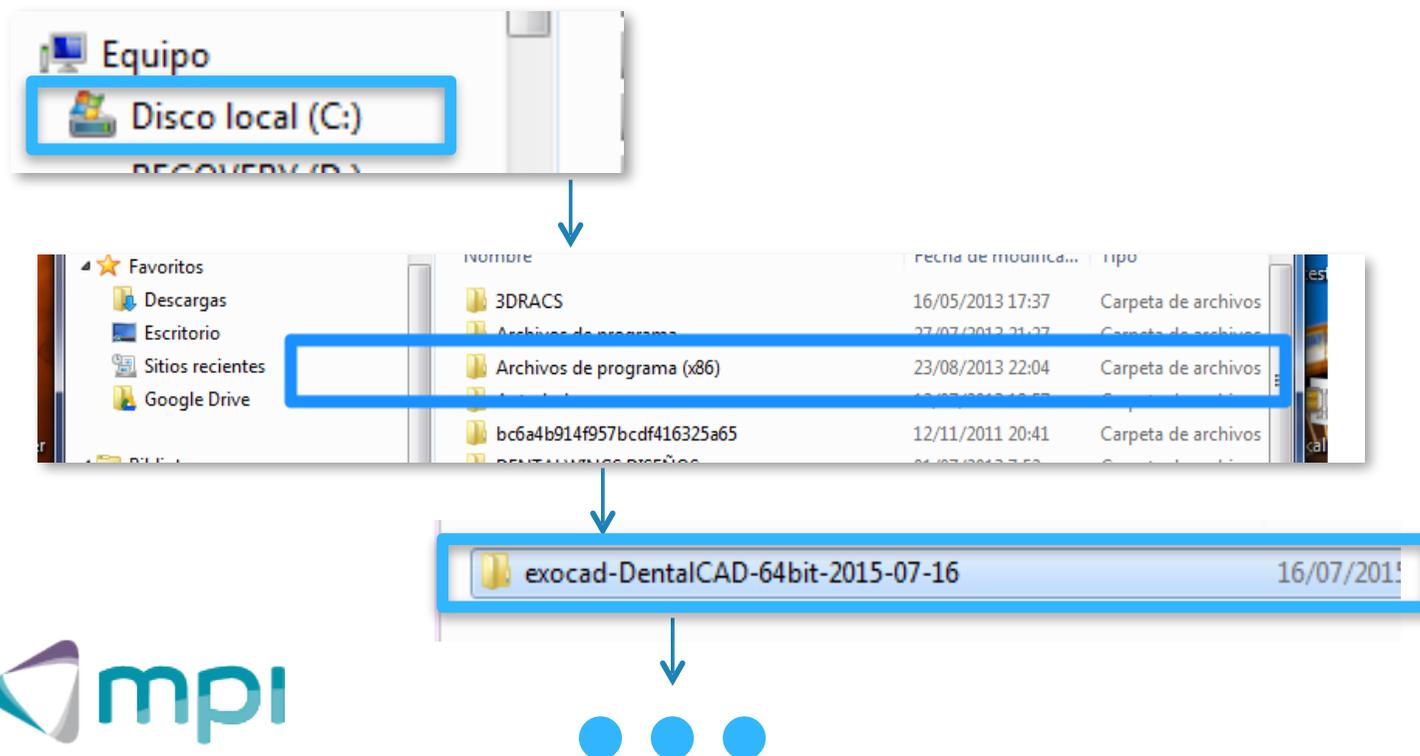


Localizar la carpeta de librerías en Exocad

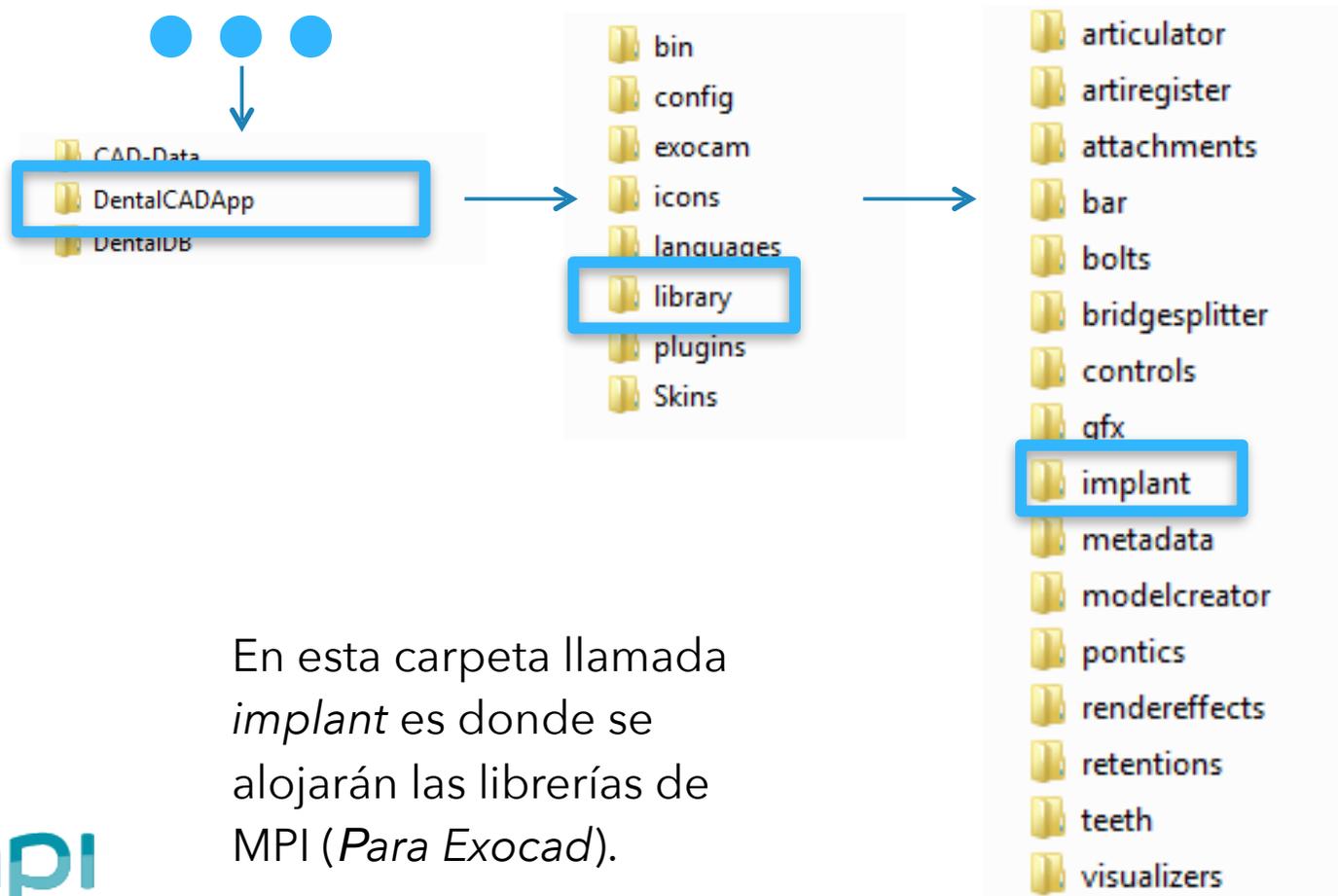



Copiar las librerías MPI en la carpeta de librerías de Exocad

Ponga la carpeta *Descargas* (que contiene la carpeta de librerías *MPI Exocad*) al lado de la carpeta *implant* de Exocad.

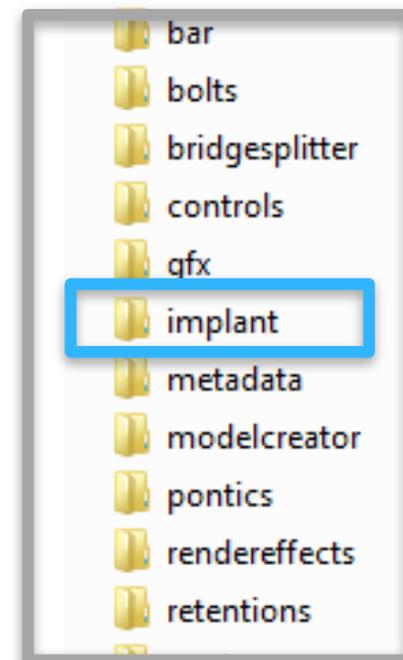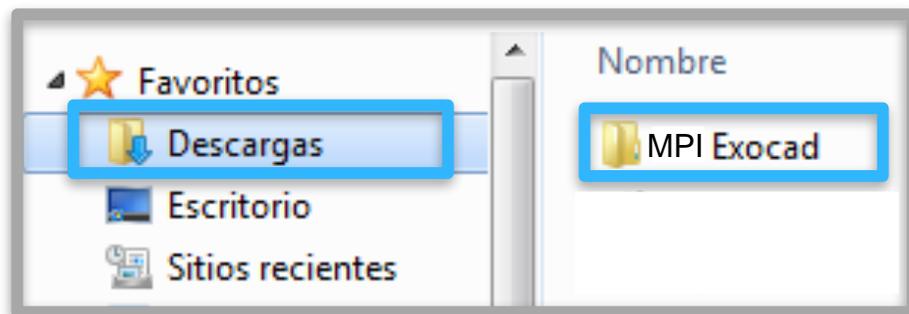



Copiar las librerías MPI en la carpeta de librerías de Exocad

Seleccione la carpeta "MPI Exocad" y pulse el botón derecho del ratón. Elija "Copiar".

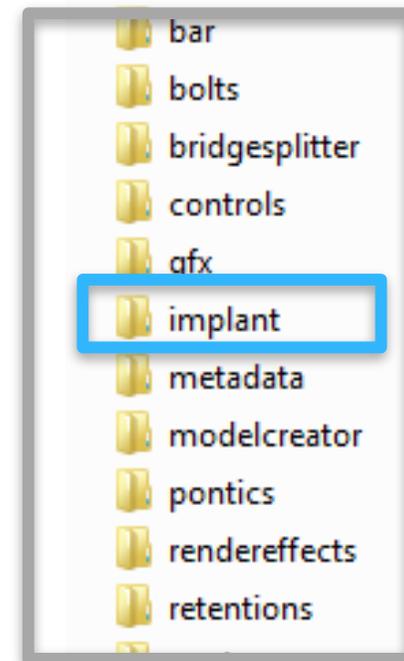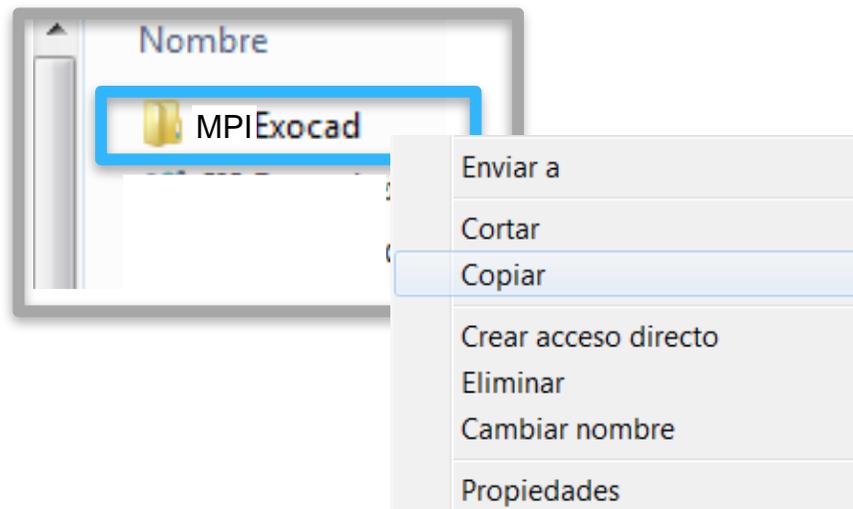


Copiar las librerías MPI en la carpeta de librerías de Exocad

Coloquese encima de la carpeta *implants* y pulsando el botón derecho seleccione "Pegar".

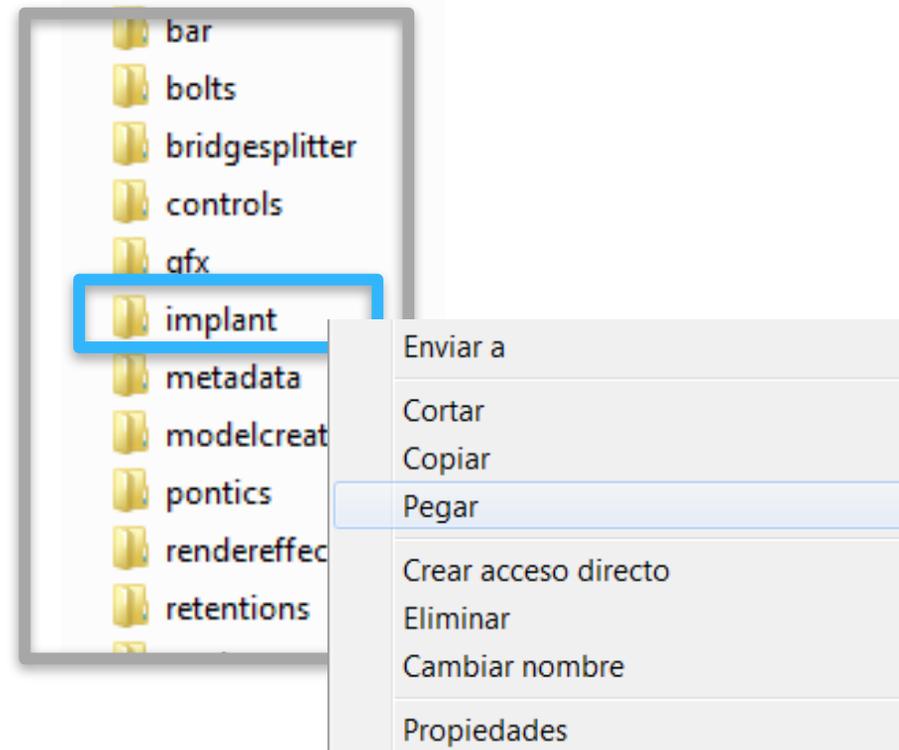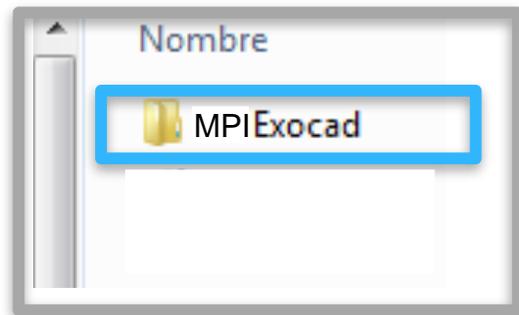


Comprobación

Asegúrese que tiene las librerías correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad. Entre en la carpeta *implants* y localice que estén los los archivos que empiezan por MPI...

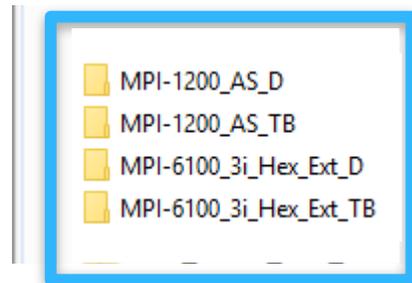

Ejecutar Exocad

Ejecutar Exocad y elegir la interfase de MPI o directo a Implantes.

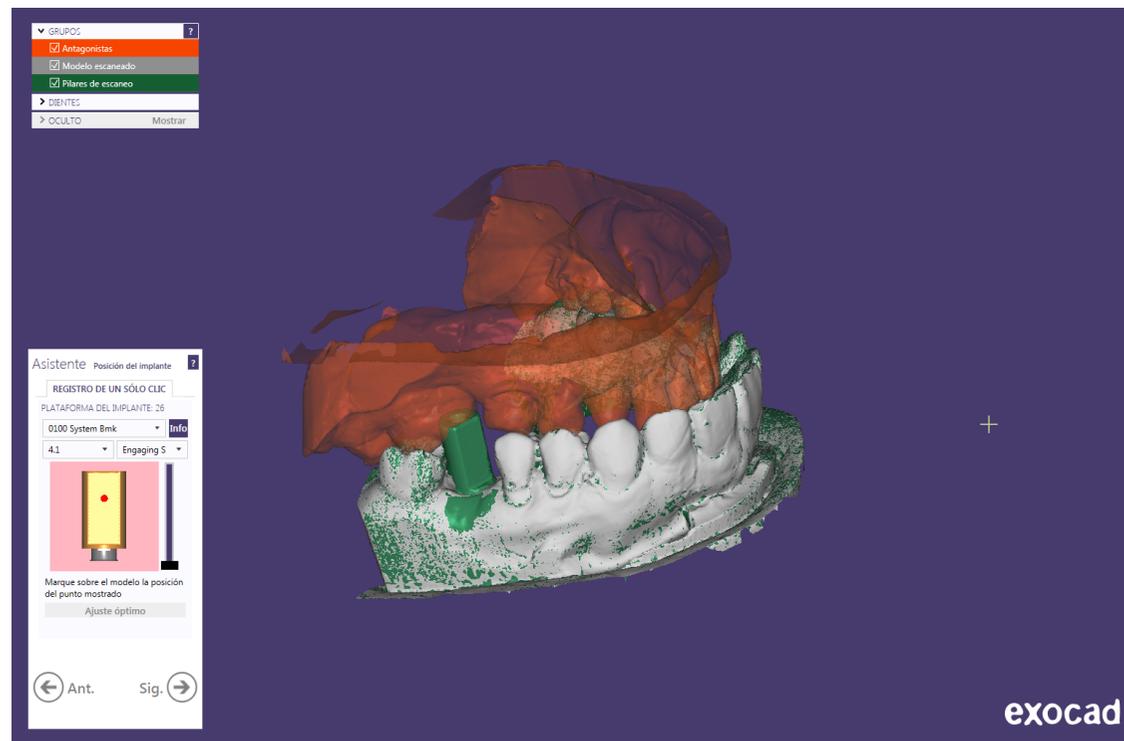

Gracias por confiar en nosotros

MPI Implant System

